

NASYA™ ist ein natürlicher, von chemischen Wirkstoffen freier Nasenspray zur Prävention einer allergischen Rhinitis (Heuschnupfen und Allergien). Die in NASYA™ verwendete, patentierte ThixoPro™-Technologie nutzt eine Kombination aus Ölen und Emulgatoren, die NASYA™ seine einzigartige Wandlungsfähigkeit vom Gel- in den Flüssigzustand verleiht. Auf diese Weise lässt es sich leicht versprühen. Sobald NASYA™ auf die Nasenschleimhaut gesprüht ist, nimmt es wieder seine ursprüngliche gelförmige Konsistenz an und bildet eine für Allergene undurchlässige Barriere. Allergische Symptome wie Niesen, nasale Verstopfung, Juckreiz und Nasenlaufen werden somit nicht ausgelöst. Eine Anwendung bietet 4 – 6 Stunden lang Schutz vor Allergien.

Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß EU-Richtlinie

NASYA™ wirkt nicht systemisch, das heißt es wird nicht in den Körper aufgenommen. Sicherheit und Wirksamkeit wurden unabhängig voneinander bewertet. NASYA™ enthält keine Konservierungsstoffe, keinen Alkohol oder Aromachemikalien. NASYA™ eignet sich daher zur langfristigen, sicheren Verwendung.

Inhaltsstoffe:

Bentonit, Xanthan, Sesamöl, Pfefferminzöl, Wasser und Stabilisatoren.

Gebrauchshinweise:

- Vor Gebrauch mindestens 8 Mal kräftig schütteln.
- Vor dem ersten Gebrauch bitte vorpumpen. Zum Vorpumpen betätigen Sie die Pumpe so lange, bis die Sprühfunktion voll hergestellt ist. Dieser Schritt muss nicht wiederholt werden, wenn der Spray unmittelbar darauf noch einmal verwendet wird.
- Bitte Nase vor jeder Anwendung gründlich reinigen. Nur in der Nasenhöhle anwenden.
- Empfohlen für Erwachsene und junge Menschen ab 12 Jahren. Bitte verwenden Sie für Kinder unter 12 Jahren NASYA™ kids.
- Ein bis zwei Mal in jede Nasenöffnung sprühen, zwei bis drei Mal pro Tag.




Schritt 1

Vor jeder Anwendung von NASYA™ muss das Fläschchen mindestens 8 Mal kräftig geschüttelt werden. Danach die transparente Schutzkappe abnehmen.



Schritt 4

Diese Schritte auch an der zweiten Nasenöffnung durchführen. Transparente Schutzkappe wieder aufsetzen und Fläschchen bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

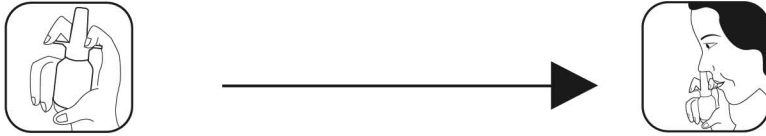

Schritt 2

Nase reinigen und danach den Kopf leicht nach vorne neigen. Fläschchen senkrecht halten und den Zerstäuber zur Gänze in die Nasenöffnung einführen. Das Fläschchen mit dem Daumen an der Unterseite halten und mit zwei Fingern am weißen Zerstäuberteil nach unten drücken.



Schritt 3

Kopf nach der Anwendung kurz nach hinten neigen und normal durch die Nase atmen.

140 Dosen
(Reicht für etwa 30 Tage)

Hinweise zur Lagerung:

- Setzen Sie die transparente Schutzkappe nach jeder Anwendung wieder auf und verwahren Sie das Fläschchen bei Raumtemperatur an einem kühlen und trockenen Ort geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung auf.
* Hinweis: Niedrigere Temperaturen können die Tröpfchengröße und Sprühfähigkeit beeinträchtigen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Warnhinweise:

- Bei NASYA™ sind keine Nebenwirkungen bekannt. Die Inhaltsstoffe sind inert sowie ungiftig und werden häufig in Nahrungsmitteln und pharmazeutischen Präparaten verwendet.
- NASYA™ führt nicht zu Benommenheit und eignet sich für Erwachsene und junge Menschen ab 12 Jahren. Diese sollten NASYA™ nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Wenn Sie nach der Anwendung Beschwerden feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie eventuell Ihren Arzt/Ihre Ärztin auf.
- In der ersten Stunde nach der Anwendung kann das Gefühl einer Nasenverstopfung auftreten. Dieses Gefühl ist vorübergehend, klingt rasch wieder ab und wird mit darauf folgenden Anwendungen langsam verschwinden.
- Bei einer empfindlichen Nasenschleimhaut kann nach der ersten Anwendung von NASYA™ das Gefühl einer leichten Reizung auftreten. Dieses Gefühl klingt jedoch rasch wieder ab.
- Jeden Kontakt mit offenen Wunden vermeiden.

Achtung:

- Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen verbrauchen.
- Nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwenden.

Hersteller:
InQpharm Europe Ltd.
Waldseeweg 6
13467 Berlin
Deutschland

www.nasya.at

Vertrieb:
ERWOPharma
ERWO-Pharma GmbH
Europaring F15/202
2345 Brunn am Gebirge
Österreich